

# 連接HealthCap 拍健應用程式六步曲

**1** 安裝 HealthCap 拍健應用程式及註冊帳號



掃描二維碼下載  
HealthCap拍健應用程式



**2** 開啟流動裝置內藍牙功能。如使用於 Android系統，請同時開啟定位功能。



藍牙



位置

**3** 配戴手臂帶（如圖）並按一下藍牙血壓計上「設定」按鈕，以啟動血壓計。



**4** 開啟流動裝置內HealthCap 拍健應用程式，在主頁點擊「拍健藍牙血壓計」，血壓計應已自動連接。



如顯示「血壓計未連接拍健」，請點擊「重新連接」。

**5** 點擊「開始」，開始量度血壓並保持放鬆。



**6** 量度完成後，血壓紀錄會自動儲存到 HealthCap 拍健應用程式中。完成紀錄後可查看血壓報告，了解您的血壓健康。

